

Katheter-Sets



PEG-Set, steril

ArtNr:	22399006.
PZN:	01753078
Umkarton:	200 Packungen

Beschreibung:

- 3 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 2 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach, mit Schlitz
- 1 Klebevlies 12 x 15 cm
- steril
- 1 Gebrauchsanleitung

Gebrauchsinformation:

- saubere Arbeitsfläche schaffen
- Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen
- alten Verband entfernen, die Fixierung der Halteplatte öffnen und leicht zurückziehen
- Handschuhwechsel
- Haut mit erster Vlieskompresse (ohne Schlitz) desinfizierend reinigen
- mit zweiter Vlieskompresse (ohne Schlitz) die Halteplatte und die Sonde desinfizierend reinigen
- Desinfektionsbereich trocknen lassen
- Schlitzkomresse zwischen Haut und Halteplatte um die Sonde legen
- mit der dritten Vlieskompresse (ohne Schlitz) die Halteplatte abdecken
- mit Fixierpflaster befestigen