

## Labor - Lanzetten



### **Sicherheitslanzetten UltraSafe 21 G, 0,80 mm x 1,8 mm, blau (100 Stück)**

|           |              |
|-----------|--------------|
| ArtNr:    | 19170014     |
| PZN:      | 19264799     |
| Umkarton: | 10 Packungen |

#### **Beschreibung:**

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

#### **Anwendung:**

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen